

Warszawa, 27.09.2022 r.

Szanowni Klienci,

Istotne zmiany dotyczące wykonania badań odczynnikami:

CK-MB-LQ o nr kat. MI41254

z firmy SPINREACT

1. Aplikacje dla analizatorów **BS-120 i BS-200/200E** znajdują się w instrukcji dołączonej do zestawu.
2. Aplikacja dla analizatora **EpoII-200/300**:
 - Długość fali 340 nm
 - Metoda Dwupunktowa
 - Objętość odczynnika R1: 240 µl, R2: 60 µl, próbki: 30 µl
 - Czas reakcji: Czas inkubacji R1/R2-120/120, Czas reakcji-60, Odczyt-180
 - Liniowość do 500 U/L
 - Faktor (Manual input): 2540

Po wprowadzeniu zmian proszę o wykonanie kalibracji i badań na surowicach kontrolnych. Miana Multikalibratora oraz surowic kontrolnych pozostają bez zmian.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z działem Kontroli Jakości Alpha Diagnostics, tel. (22) 631-40-13.

Dorota Grzesiak-Nagórska
Kierownik Kontroli Jakości