

Warszawa, 25.03.2022 r.

ERRATA
DOTYCZĄCA WARTOŚCI LDH-P (ODCZYNNIK Z FIRMY ERBA)
DLA SUROWIC KONTROLNYCH I MULTIKALIBRATORA

Multikalibrator nr serii	280019-2	426 U/L
Surowica Normalna nr serii	200051	281 (230 - 332) U/L
Surowica Patologiczna nr serii	201031	571 (468 - 674) U/L
Surowica Normalna nr serii	200129	335 (275 - 395) U/L
Surowica Patologiczna nr serii	201069	455 (373 - 537) U/L

Po wprowadzeniu zmian proszę o przeprowadzenie **kalibracji oraz kontroli** na surowicach kontrolnych.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z działem Kontroli Jakości Alpha Diagnostics, tel. (22) 631-40-13.

Dorota Grzesiak-Nagórska
Kierownik Kontroli Jakości

APLIKACJE NA APARATY BIOCHEMICZNE DLA ODCZYNNIKA LDH-P z firmy Erba

Analizator BS 120 LDH-P Erba		Analizator BS 200 LDH-P Erba		Analizator BS 380 LDH-P Erba	
Test	LDH-P	Test	LDH-P	Test	LDH-P
Nr:		Nr:		Nr:	
Pełna nazwa	LDH-P	Pełna nazwa	LDH-P	Pełna nazwa	LDH-P
Typ reakcji	Kinetyka	Typ reakcji	Kinetyka	Typ reakcji	Kinetyka
Główna fala	340	Główna fala	340	Kierunek reakcji	spadek
Wtórna fala	660	Wtórna fala	660	Jednostka	U/mL
Kierunek reakcji	Opadający	Kierunek reakcji	Opadający	Precyzja	Całkowita
Czas reakcji	3...-13	Czas reakcji	4...-14	Blank odczynnika	
Czas inkubacji		Czas inkubacji		Czas reakcji	41...-51
Jednostka	U/L	Jednostka	U/L	Główna fala	340
Precyzja	Całkowita	Precyzja	Całkowita	Wtórna fala	660
Odcz. R1	160	Odcz. R1	160	Odcz. R1	160
Odcz. R2	40	Odcz. R2	40	Odcz. R2	40
Objętość próbki	4	Objętość próbki	4	Objętość próbki	4
Zakres liniowości	43.8-1200	Zakres liniowości	43.8-1200	Zakres liniowości	43.8-1200

Analizator EPOLL-200/300 LDH-P Erba

Test	LDH-P
Nr:	
Pełna nazwa	LDH-P
Typ reakcji	Kinetyka
Główna fala	340
Wtórna fala	660
Zakres abs.	0.8-5
Zakres liniowości	43.8-1200
Jednostka	U/L
Precyzja	Całkowita
Odcz. R1	160
Odcz. R2	40
Objętość próbki	4
Czas reakcji	
	inkubacja 120/60
	pomiar 180
lub	
	inkubacja 120/120
Czas reakcji	60 odczyt 180