

Warszawa, 27.09.2022 r.

Szanowni Klienci,

Istotne zmiany dotyczące wykonania badań odczynnikami:

LDL Cholesterol D metodą bezpośrednią o nr kat. MI41023
z firmy SPINREACT

1. Aplikacje dla analizatorów **BS-120 i BS-200/200E** znajdują się w instrukcji dołączonej do zestawu.
2. Aplikacja dla analizatora **EpoII-200/300**:
 - Długość fali 578 nm
 - Metoda Punkt Końcowy
 - Objętość odczynnika R1: 225 µl, R2: 75 µl, próbki: 3 µl
 - Czas reakcji: Czas inkubacji R1/R2-120/60, Czas reakcji-260, Odczyt-40
 - Liniowość do 976 mg/dl
 - Faktor (Manual input): 231

Po wprowadzeniu zmian proszę o wykonanie kalibracji i badań na surowicach kontrolnych. Miana Multikalibratora oraz surowic kontrolnych pozostają bez zmian dla metody bezpośredniej.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z działem Kontroli Jakości Alpha Diagnostics, tel. (22) 631-40-13.

Dorota Grzesiak-Nagórska
Kierownik Kontroli Jakości